



# ひざ用サポーター スリーブ 竹炭 (履くタイプ)

5713

## ■ 着用方法

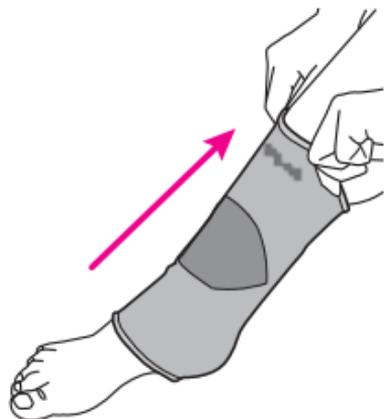

① ロゴのある面を前にして、足を通します。

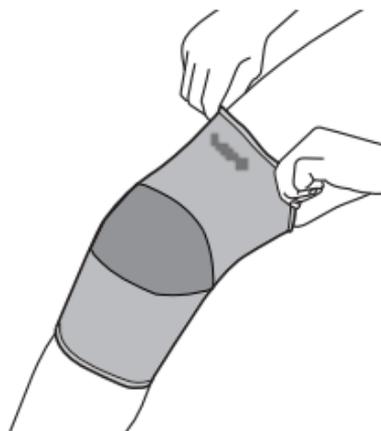

② サポーターを引き上げ、たるみがでないようにしっかり伸ばしてください。

## ■ サイズ表

品番	サイズ	適用範囲(ひざ頭の周囲)
000-0853	M	35~45cm
000-0854	L	39~49cm

縫製によって形やサイズに多少の差異が生じる場合がございます。  
製品の仕様、外観は改良等の理由により予告なく変更することがあります。

## ■ 材質

ナイロン レーヨン(竹炭繊維配合) 綿

## 使用上のご注意

- 本製品は膝関節をサポートするように設計されておりますが、治療器具ではございません。
- この説明書に示した用途以外のご使用は怪我や破損の原因となりますのでお止めください。
- 血行障害を起こす恐れがあるため、サイズが合わない場合や、タイツ・ズボン等の重ね履きでのご使用はご遠慮ください。
- 敏感肌の方やアレルギーをお持ちの方は、ご使用をお控えください。ご使用中にかぶれ等が生じた場合は、ただちに使用を中止してください。
- 使用中にしびれ等の異常を感じた場合は、すぐに使用を中止し医師にご相談ください。
- 就寝中は装着しないでください。また、同一姿勢での一時間以上のご使用は避け、適度に脱着を繰り返してください。

## お手入れ方法

- 洗濯をする場合は30℃以下の水で中性洗剤を使用し、ゆっくりねじらずに手洗いしてください。
- 漂白剤、柔軟剤、アイロン、洗濯機、乾燥機の使用やドライクリーニングは避けてください。
- 手洗い後は水でよくすすぎ、乾いたタオルなどで水気を吸い取り、陰干ししてください。
- 高温多湿・直射日光を避けて保管してください。素材の特性上、保管状況により変色することがあります。



■ 輸入販売元  
トワテック株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷2-3-7 お茶の水元町ビル2階  
TEL: 0120-609-151 / URL: <https://www.towatech.net/>