

Towatech

トワテック 粘着パッド (4枚入)

【警告・注意】

- ・使用する前に、アルコールやお水で使用部位を清潔にしてお使いください。
- ・傷または炎症を起している部位には使用しないでください。
- ・かゆみ、かぶれ、やけど、発疹等のトラブルが生じた場合は、直ちに使用を中止してください。
- ・車の運転中や他の機械の操作中に本品を使用しないでください。



・保護シートから粘着パッド本体を持って取り外してください。

・保護シートから粘着パッド（本品）を取り外した後、本品をしっかりと皮膚に貼り付けてお使いください。



・肌から本品を剥がす際は粘着パッド本体を持って取り外してください。コネクターリード線やワニ口コードを引っ張らないでください。

・剥がした後に本品を貼り付けた部位をタオルで拭いてください。皮膚に粘着剤がついたまま放置すると、かぶれ等の原因になります。



スナップ式



クリップ式

・スナップ式の粘着パッドをワニ口コードやスナップ式コードで、粘着パッドの金属部分にしっかりと固定してください。

・クリップ式の粘着パッドをワニ口コードで、粘着パッドの突起部分を挟んでご使用ください。

- ・接続機器の取扱説明書に従ってお使いください。
- ・ご使用中に本品を剥がさないでください。
また、露出した金属部に触れると感電する場合があります。
- ・コードを持って引っ張ると内部が断線する恐れがあります。
また、やけどの原因になる場合があります。

【保管上のご注意】

ご使用後は、必ず保護シートに貼り付け、袋の中に密閉し、適温（+5℃～+27℃、湿度 40～70%）で保管してください。適温外の環境で保管しますと、ゲル面の粘着力が弱くなり、品質劣化の原因となります。

【交換の目安】

粘着パッドは消耗品です。

次の事項に該当しましたら新品と交換してください。

- ・未開封であっても使用期限（製造してから 18 ヶ月）を過ぎた場合
- ・粘着力の低下や乾燥・えぐれなど劣化が見られた場合
- ・コードがパッド本体との接触部で緩み・ぐらつきが生じた場合
- ・黒フィルム（カーボンフィルム）の破れ・変色など破損や劣化が生じた場合

発売元 トワテック株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷 2 丁目 3 番 7 号 お茶の水元町ビル 2 階