



irodori AKANE 台座灸 取扱説明書

この度は弊社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

本説明書をお読みにになり、正しくご使用ください。

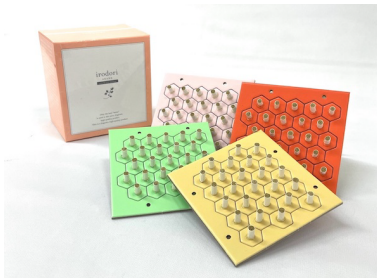

拡大画像

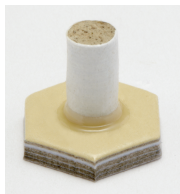


■仕様

品番・商品名	設定温度
000-0970 Soft (ソフト)	約 38 °C
000-0803 Light (ライト)	約 40 °C
000-0804 Regular (レギュラー)	約 43 °C
000-0971 Hard (ハード)	約 45 °C


燃烧時間 約 2分半～3分

※燃烧時間、温度はご使用の環境（気温・湿度など）により異なる場合があります。自社で測定を行っているため、他メーカー商品との比較ができるものではありません。


■ご使用方法

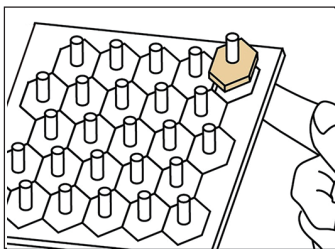

①台座の裏面を指先で押し上げます。

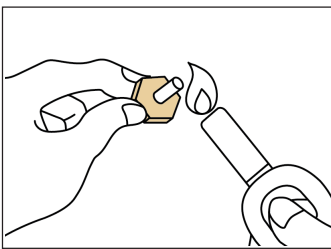

②もぐさに火をつけます。

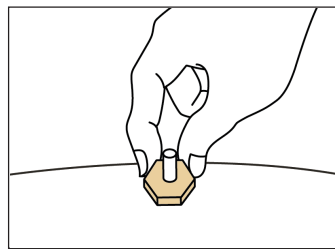

③ツボに合わせて肌に貼りつけます。

☒注意事項

【使用上のご注意】

●目の周り・粘膜へのご使用はお避けください。顔へのご使用は推奨していません。●初めてご使用される方、お肌の弱い方や敏感な方のご使用は十分にご注意ください。ご使用中、施灸部に異常を感じた時、または熱いと感じた時は、我慢せずに直ちにご使用を中止してください。●汗などをよく拭き取り清潔にして、皮膚表面が乾燥した状態でご使用ください。●本品を貼り直すと、粘着力が低下して剥がれる恐れがあります。●同じところに繰り返し使用すると、お肌に負担をかけます。やけどの原因になりますので、ご注意ください。●本品を下向きに使用しないでください。燃烧温度が高くなり、やけどの恐れがあります。●火災の恐れがありますので、ご使用後は、消火したことを十分に確認の上で、灰皿などに捨ててください。

【警告・注意】

●本品は火を使う特性上、やけど、低温やけど、水疱を生じることがあります。商品瑕疵以外のやけどによる責任は負えません。●以下に該当する症状の方は、ご使用をお避けください。有熱時、化膿症の方、傷や炎症のある部分（やけど、外傷、化膿など）、皮膚移植した部分、刺青のある肌、肌に異常がある時（皮膚炎、湿疹など）、発汗時、お風呂上がりなど肌に水分がある時、酒酔いの時、入浴前後一時間以内。●以下に該当する方に使用する際は、医師等の事前の指導の下、十分注意の上でご使用ください。体調がすぐれない方、体力が低下している方、ご自分で温度調節のできない方、妊婦または妊娠の可能性のある方、幼児、動物。●本品は水に濡れた状態では使用できません。●本品は食べられません。●AKANE ハードの温度帯は高温になる為、やけどの恐れがあります。ご使用の際には必ず調熱絆（別売品）と一緒にご使用ください。また、AKANE ハードは、一般の方（治療家ではない方）のセルフケアのご使用はおすすめできません。

☒保管上の注意

●幼児の手の届かないところに保管してください。●高温多湿の環境を避けて保管してください。保管状態により粘着力が劣化する可能性があります。粘着力が弱い場合はご使用をお控えください。●なるべく通気性が良い場所に保管してください。保管状態によりカビや虫が発生する恐れがあります。

■販売元

トワテック株式会社 〒113-0033 東京都文京区本郷 2-3-7 お茶の水元町ビル2階

2022.07.05 改定